


Brukerveiledning for Coldtainer kjølebokser

(Gjelder for modellene: T0022 FDN, T0022 FDH, T0032 FDN og T0032 FDH)

Oppdatert 05.01.2021 – se blå tekst vedrørende strømtilkobling

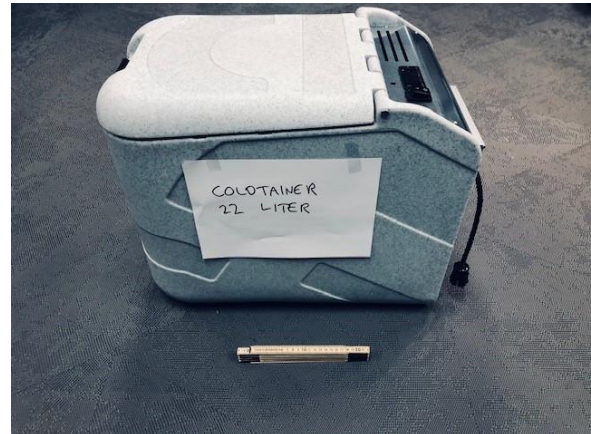

Oppstart av kjøleboksen

- Koble boksen til strøm – enten til strømmettet eller sigarettenner i bil
- Strømforsyning via strømmettet kobles via gul plugg inn til boks (ikke tilkoblet ved levering).
- Strømforsyning via sigarettenner kobles gjennom medfølgende kabel via rød plugg inn til boks.
- Både gul og rød plugg kan være tilkoblet samtidig.
- Kort ledning - kan være nødvendig med skjøteledning
- Start boksen med av og på - bryteren
- Etter noen sekunder vil displayet gjøre en kort selvtest
- Boksen har +4°C som fabrikkinnstilt temperatur og starter automatisk å kjøle ned mot denne.
- Nedkjøling til +4°C tar 15-20 minutter

Bruk av kjøleboksen

- La boksen kjøle seg ned til ønsket temperatur (minimum 1 time) før du legger i vaksineampuller
- Unngå å åpne lokket unødig, slik at temperaturen holder seg stabil

- Det er viktig at det er nok luft rundt boksen, slik at den får avgitt varme fra viften.
- Displayet låses etter 30 sekunder uten aktivitet. Trykk en tast til det står "UnL" (unlock) for å endre innstillinger.

Bruk av kjølebokser ved transport

- Ved transport skal boksen helst kobles til batteripakke eller til 12V via sigaretttenner i bil.
- NB strøm i bil virker som oftest kun når bilen er i gang.
- Pass på at bilen er varm før du bærer boksen ut i bilen. Boksen bør ikke stå ute i minusgrader.
- Boksen må ikke åpnes under transport uten at den er koblet til strøm
- Vi anbefaler at boksene alltid er koblet til strøm under transport.
- Når boksen med innhold er kjølt ned til rett temperatur, kan du transportere boksen i en time frakoblet strøm, uten at temperaturen avviker vesentlig. Vær oppmerksom på at utendørstemperatur kan påvirke temperatur i boksen

Ved behov for endring av temperatur i kjøleboksen

- Lås opp displayet ved å trykke en tilfeldig tast i mer enn 4 sekunder til displayet viser "UnL"
- Trykk SET-tasten – og bruk pil opp eller ned til displayet viser ønsket temperatur
- Trykk SET-tasten på nytt eller vent i 30 sekunder.

Rengjøring av kjøleboksen

- Koble kjøleboksen fra strømtilførsel før rengjøring og vedlikehold.
- Anbefalinger om renhold finner du i bruksanvisningen fra produsenten.

Still inn alarm ved første gangs bruk

- Vi anbefaler at dere stiller inn alarm første gang boksen tas i bruk
- Alarmen bør settes 2 grader høyere og lavere enn innstilt temperatur (+4 grader celsius fra fabrikkfabrikken)
- For å stille alarm, gjør følgende:
 - Lås opp displayet ved å trykke en tilfeldig tast i mer enn 4 sekunder til displayet viser "UnL"

- Trykk på SET-tasten i 4 sekunder til "PA" vises
 - Trykk på SET - tasten, displayet viser nå "0"
 - Trykk piltast ned til det vises tallet "-19" i displayet
 - Trykk på SET-tasten. Displayet vil nå vise "SP" (Spesial Parametere)
 - Bla oppover til "A5" – indikerer "høy " velg "1" – indikerer aktiv – og trykk SET-tasten
 - Bla til "A4", trykk SET og **velg ønsket maksimumstemperatur** på alarmen – for eksempel +2°C
 - Bla til "A2", trykk SET – indikerer "lav", velg "1" – indikerer aktiv – og trykk SET-knappen
 - Bla til "A1", trykk SET og **velg ønsket minimumstemperatur** – for eksempel -2°C
- Hvis temperaturen i kjøleboksen går utenfor de grenseverdiene du har satt, vil displayet veksle mellom å vise temperaturen i boksen og henholdsvis "AH" ved for høy temperatur og "AL" ved for lav temperatur. Det vil også komme en lydalarm, denne kan du slå av ved å trykke en tilfeldig tast. Alarmen i displayet blir borte hvis temperaturen kommer innenfor de grenseverdiene som er satt. De grenseverdiene du har satt blir lagret. Hvis du skrur av kjøleboksen, vil alarmen automatisk være aktiv – med de grenseverdiene du har satt - neste gang du starter kjøleboksen.
 - Vaksinene må ikke fryse. De skal oppbevares i kjøleskaptemperatur +2/+8 grader celsius.

Brukerstøtte

- Ved behov for brukerstøtte på dagtid – kl 07.30 - 16.30
 - E-post: support-no@eberspaecher.com
 - Telefon: 66 82 30 50 (tastevalg 2)
- Utenom kontortid:
 - Telefon 918 00 427 eller
 - Telefon +46 72 51 93 900