

Brukerveiledning for kjøleboks Dometic – 10,5 liter (Dometic CF 11)

- (Oppdatert tekst pr 14.01.2021 i blå skrift – se avsnittet vedrørende Bruk av kjøleboksen)



Oppstart av kjøleboksen

- Koble boksen til strøm med en av ledningene som følger med. Det følger med en ledning for å kople kjøleboksen til strømnettet (230 volt) og en ledning for å kople til sigaretttenner i bil eller batteri (12 volt).
- Start boksen med av og på – bryteren.

Stille inn temperatur i kjøleboksen

- Temperaturen stilles inn på +5 grader celsius

- Trykk "SET"-knappen en gang
- Bruk "+" og "-" til å stille inn temperatur
- Valgt temperatur vises i displayet i noen få sekunder
- Displayet blinker flere ganger, før det går tilbake til temperaturen som er i boksen
- Når boksen har nådd satt temperatur vil det lyse oransje ved "POWER LED"

Bruk av kjøleboksen

- La boksen kjøle seg ned til satt temperatur i minimum én time før du legger i vaksineampuller. Dette for å sikre at hele boksen er nedkjølt og holder temperaturen bedre.
- Ampullene med vaksine må oppbevares minimum 10 cm over bunnen i boksen for å unngå at vaksinen kommer i berøring med kjøleelementet. Bruk gjerne en type rist eller lignende for å sikre luftgjennomstrømning og jevn temperatur i boksen.
- Hold lokket lukket når boksen ikke er i bruk, slik at temperaturen holder seg stabil.
- Det er viktig at det er nok luft rundt boksen, slik at den får avgitt varme fra viften.

Bruk av kjølebokser ved transport

- Ved transport skal boksen helst kobles til batteripakke eller til 12V via sigaretttenner i bil.
- NB strøm i bil virker som oftest kun når bilen er i gang.
- Pass på at bilen er varm før du bærer boksen ut i bilen. Boksen bør ikke stå ute i minusgrader.
- Boksen må ikke åpnes under transport uten at den er koblet til strøm.
- Vi anbefaler at boksen alltid er koblet til strøm under transport.
- Når boksen med innhold er kjølt ned til rett temperatur i minimum én time, kan du transportere boksen i inntil en time, uten at temperaturen avviker vesentlig. Vær oppmerksom på at utendørstemperatur kan påvirke temperatur i boksen.

Rengjøring av kjøleboksen

- Koble kjøleboksen fra strømtilførsel før rengjøring og vedlikehold.
- Anbefalinger om renhold finner du i bruksanvisningen fra produsenten.

Kontroll av temperatur

- For ekstra kontroll av temperatur – legg en termometer i boksen for å sjekke at temperatur i display stemmer overens med temperaturen på termometeren. Hvis det er avvik mellom de to, vurder om boksen må stilles opp eller ned. Justér temperaturen 1 grad opp eller ned i displayet. Vent noen minutter, mål deretter på nytt og vurder om det er behov for å justere temperaturen i displayet ytterligere.
- Vaksinene må ikke fryse. De skal oppbevares i kjøleskapttemperatur +2/+8 grader celsius.

[Brukerveiledning fra leverandør](#) finner du på nettsidene til Dometic.

Brukerstøtte

- Ved behov for brukerstøtte på dagtid – kl 08-16:


E-post: **firmapost@dometic.no**

Telefon: **33 42 84 50**

HVORDAN BRUKE DOMETIC COOLERS


DOMETIC CFX3 35

1. Starte kjøleboksen
Trykk på startknappen (1) på kontrollpanelet for å starte kjøleboksen



Control panel pictured


2. Stille inn temperatur
Når kjøleboksen er slått på, trykk på OK-knappen (4) på kontrollpanelet for å åpne menyen. Velg "Set Temp" ved å trykke på OK-knappen (4), og velg ønsket temperatur ved bruk av pilastene (3). Når du har valgt ønsket temperatur, trykk OK-knappen (4) for å bekrefte innstillingen.



DOMETIC CF11

1. Starte kjøleboksen
Trykk på PÅ/AV-knappen (1) i tre sekunder. "POWER" LED (2) lyser grønt. Når kjøleboksen har nådd lagret temperatur lyser LED oransje. Displayet (5) slås på og viser gjeldende temperatur inne i boksen. Boksen starter nå kjøling.

2. Stille inn temperatur
Trykk på "SET"-knappen (4) en gang. Bruk "+" (6) og "-" (7) knappene til å stille inn ønsket temperatur. Valgt temperatur vises da i displayet i noen få sekunder. Displayet blinker flere ganger før det går tilbake til faktisk temperatur i boksen.

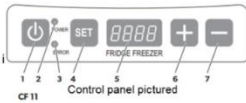


CF 11 Control panel pictured

MERK!

Ved bruk uten strøm (12V ei nettkobling) bruk ispakker for å sikre maksimal kjølekapasitet. Dette produktet er ikke ment å brukes uten strøm, og Dometic kan ikke garantere temperatur i boksene som kreves uten strømtilkobling.

PLB40 Batteripakke

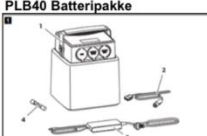

Hvordan bruke PLB40
Når du ikke er koblet til strømmet eller 12/24V sigarettener, bruk PLB40 batteripakke for å sikre kjølelytelsen. Trykk på PÅ/AV-knappen (1) for å slå på. Når den er slått på, koble til 12V-kontakten til inngang (5)